




Implantat-Abformung in „besser“

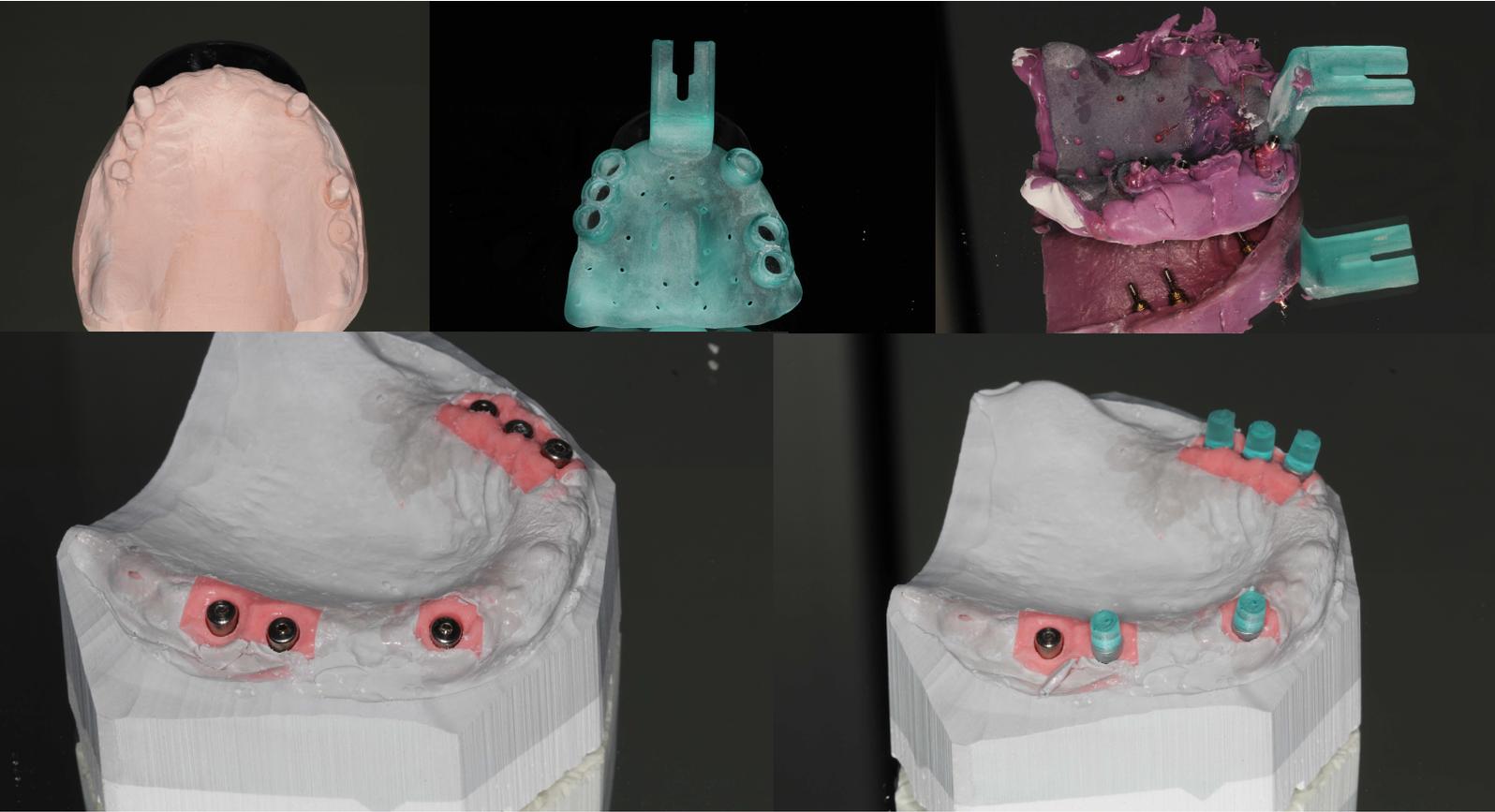

Offener Implantatlöffel mit Folienabdeckung

Unsere Erfahrung: Die Abformung von Implantaten mit offener Abformung ist äußerst exakt. Dennoch gibt es Optimierungsmöglichkeiten in Sachen Handling. Allein aufgrund der oft nur teilweise dargestellten Gingivaformer auf dem anatomischen Modell ist es nicht möglich die Implantatrichtung und -position zweifelsfrei zu erkennen. Daraus resultiert dann eine falsche Platzierung des Abformkamins im offenen Löffel. Ärgerlich, denn jetzt muss am Stuhl nachgearbeitet werden.

Mit unseren Visualisierungspfosten können Sie die uns die Lageerkennung mit minimalem Aufwand erleichtern. Die Visualisierungspfosten werden einfach auf die Gingivaformer aufgesetzt, halten dort durch Friktion und liefern aussagekräftige Ergebnisse auf dem anatomischen Modells (Bild oben rechts). So können die Abformkamine nun exakt im individuellen Löffel plaziert werden.

Die Kamine werden mit Folie verschlossen. Diese ist sehr dünn und kann leicht beim Einprobieren durchstoßen werden. Trotz Perforation wird das Auslaufen von Abdruckmaterial deutlich reduziert. Saubere Sache!

Die Visualisierungspfosten bieten wir für diverse Systeme an. Einfach anfragen, ob Ihres schon dabei ist und anfordern.

Bild rechts unten: Hier sind die Pfosten zur Visualisierung nochmal aufgesetzt, wie in der Situation oben links im Mund...

B



G

E

R